

# たちあっぷ ひざたちちC 手すり

「ひざたちちC」に取付けて、よりスムーズな動作・介助が可能に!!

## 特長

より安定した「立ち上がりの補助」  
「姿勢保持」「移乗補助」が可能




- 手すりを手で掴んだり、手を掛けることで、身体を支えやすくなり、よりスムーズな動作・介助ができます。

高さハイ・ローの2タイプ

- 最適な位置で手すりをお使いいただけるように、手すりの高さは、ハイまたはローの2タイプからお選びいただけます。

手すり出幅無段階調整可能

- ハイタイプ(CKL-TA)はテーブルから1cm~11cm、ロータイプ(CKL-TB)は0cm~11cmの範囲内で無段階に出幅調整ができます。

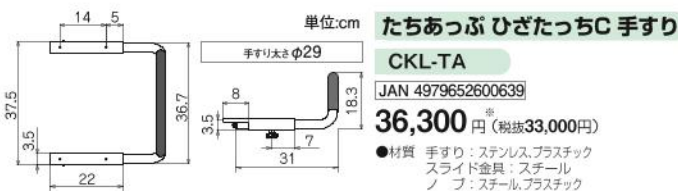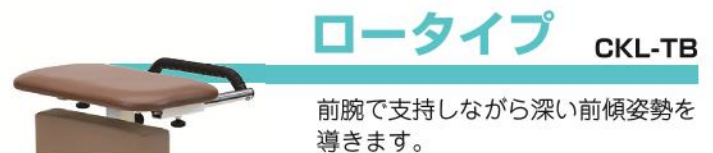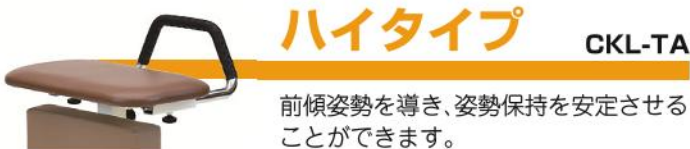

>> ※本製品はたちあっぷ ひざたちちC本体とセットでご購入の場合、非課税対象となります。詳しくは裏面をご確認ください。<<

## 手すり出幅調整

手すりの2ヵ所のノブを回しゆるめ、手すり部を両手でつかんでスライドしてください。位置が決まったら、ノブを強く締めて固定してください。



\*詳しくは取扱説明書をご確認の上、安全に注意してご使用ください。

## 移動方法

手すりと車輪を使用することで移動しやすくなります。手すりをしっかり掴んで本体を45°程度傾けて移動させてください。



## セット品

「たちあっぷ ひざたちC」本体と同時にご購入の際はセット品でご注文ください。非課税対象となります。

セット名	型番	JAN	価格	手すり高さ	手すり太さ	ベース厚み	高さ調節	質量
手すりAセット(ハイタイプ)	CKL-01TA	JAN 4979652601131	167,000円(非課税)	70	φ29	18mm	5cm間隔3段階	21.4kg
手すりBセット	CKL-01TB	JAN 4979652601148	167,000円(非課税)	70	φ29	18mm	5cm間隔3段階	21.3kg
手すりAセット(回転式)	CKL-02TA	JAN 4979652601155	300,000円(非課税)	70	φ29	31mm	5cm間隔3段階	25.4kg
手すりBセット(回転式)	CKL-02TB	JAN 4979652601162	300,000円(非課税)	70	φ29	31mm	5cm間隔3段階	25.3kg

## 課税対象? 非課税対象?

たちあっぷ ひざたちC 本体は厚生労働省通知「消費税法の一部を改正する法律(平成33年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて」の規定において移動用リフトに分類されるため、非課税対象となります。

たちあっぷ ひざたちC 手すりを単品でご購入いただく場合は課税対象です。ただし、たちあっぷ ひざたちC本体とセットでご購入いただいた場合はセットで非課税となります。たちあっぷ ひざたちC本体とたちあっぷ ひざたちC 手すりを同時にご購入の場合、たちあっぷ ひざたちC本体と同数のたちあっぷ ひざたちC 手すりも非課税対象となります。(セット品番でご注文ください。)

購入方法	対象品	課税/非課税
単品購入	たちあっぷ ひざたちC 手すり	課税対象
単品購入	たちあっぷ ひざたちC 本体	非課税対象
セット品購入	たちあっぷ ひざたちC 本体 + 手すり	非課税対象
同時購入	たちあっぷ ひざたちC 手すり + たちあっぷ ひざたちC 本体	非課税対象

●製品の仕様は改良の為、予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。 ●記載価格の総額表示は、消費税10%の価格です。 ●撮影に使用しているベッドは他社製品です。

## 矢崎化工株式会社

■本社 福祉介護機器部  
〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

■北海道支店  
〒072-0007 北海道美幌市東6条北8-2-1  
TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

■東京支店  
〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3  
TEL 04-2944-7113 FAX 04-2944-7007

■名古屋支店  
〒484-0963 愛知県犬山市宇鶴池48-2  
TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

■高松支店  
〒761-8058 香川県高松市勸使町227  
TEL 087-866-6411 FAX 087-867-1916

■仙台支店  
〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280  
TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

■神奈川支店  
〒257-0024 神奈川県栗原市名古木3-4  
TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

■大阪支店  
〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1  
TEL 072-672-8440 FAX 072-673-8822

■九州支店  
〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1  
TEL 0948-72-0310 FAX 0948-72-4026

介護支援ページ  
**kaigo-web**

<http://www.kaigo-web.info/>



お問い合わせ先